

資料1【今回設置したAEDの機器概要】

## SMARTバイフェジックAED／ハートスタートFR2

世界No.1シェア(AEDとして44.5%シェア)を誇る《BEST AED》 \*2002年Frost and Sullivan調べ



モデル番号: M3860A/M3861A  
販売名: ハートスタートFR2  
医療用具承認番号: 21400BZY00185000

### 150J固定・インピーダンス補正型・SMARTバイフェジック

サイズ: 6.6cm(H)×21.8(W)×21.8(D)

—同等クラスで世界最小

重量: 2.1kg(バッテリーを含む)

—同等クラスで世界最軽量

操作: 1-2-3の簡単操作

—誰にでも間違いなく使えます

心電図表示機能(M3860Aのみ)

—除細動前後の波形をAED上で確認できます

メンテナンス・フリー

—毎日セルフテストを実施。安心して使えます

5年保証(本体のみ)

—堅牢設計

## ハートスタート FR2 簡易取扱説明書

### <操作方法>

- 1、本体の電源を入れます。
- 2、パッドを右図のように患者に装着し、パッドコネクタを本体に接続します。
- 3、パッドが正しく装着されている場合、自動的に患者の心電図解析を始めます。  
除細動が必要な場合は、音声とメッセージで除細動が必要であることを通知し、充電が行われます。
- 4、充電完了後、ショックボタンを押してください。

注意: 8歳 (25kg) 以下の小児には使用しないで下さい。